

# Socorex® 瑞士原创

您自主的选择

## 兽用连续注射器



Socorex®兽用连续注射器包含内置型弹簧内芯和三通道配液阀门，为连续性、高精度的注射专门设计而成。概念简洁、理想均衡、人性化设计使其操作容易、使用者舒适、减少操作疲劳。

Socorex®系列注射器以其突出的性价比，更是您自主的选择。

### 主要特性和效用：

- 质量可靠、经久耐用
- 操作省力、适用于大批量的免疫
- 适用于大、中、小型动物
- 适合绝大部分水剂和混悬剂
- 可在任何气候条件下操作使用
- 拆卸简单、维护容易
- 商品化配件，均可替换

Socorex®三种原创型号

# 167 187 287

the best  
ergonomics  
in syringes

 **SOCOREX**  
SWISS

# Socorex® 瑞士原创

Socorex®连续注射器包括167、187和287三种型号。

## 手枪式 (187型)

187型手枪式注射器用途最为广泛，非常适于水剂、油剂、铁制剂或各种混悬液。包括管状、瓶状和两用型进液注射器三种类型。

手枪型连续注射器的型号选择

容积 mL	剂量范围 mL	刻度增量 mL
0.3	0.025-0.3	0.025
0.5	0.1-0.5	0.1
1	0.1-1	0.05
2	0.3-2	0.1
5	0.5-5	0.5
10	1-10	1
20	5-20	1



## 双环式 (167型)

是继经典的手枪式连续注射器后开发出的人体工程学注射器，更方便于操作、注射。

双环式连续注射器的型号选择

容积 mL	剂量范围 mL	刻度增量 mL
0.3	0.025-0.3	0.025
0.5	0.1-0.5	0.1
1	0.1-1	0.05
2	0.3-2	0.1
5	0.5-5	0.5



## 双头式 (287型)

综合高效、可靠的性能，双头式注射器可用于同时注射两种不同的液体。其中任一边均由各自的针管、阀门部件构成，可分别调节剂量。

双头式连续注射器的型号选择

容积 mL	剂量范围 mL	刻度增量 mL
0.3	0.025-0.3	0.025
0.5	0.1-0.5	0.1
1	0.1-1	0.05
2	0.3-2	0.1
5	0.5-5	0.5



## 多种配件组合

包括管瓶转换套装、PVDF延长进液管、PP装液瓶、注射握柄、PVC保护套管、废液吸弃针、灌药针头、注射针头、套管刷等。

中国区经销: **M** 中国牧工商 (集团) 总公司

北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼企发大厦813室 (100029)

电话: 010-64450187 64439738 传真: 010-64431776

E-mail: FDAH@cahg.com.cn

## ► 使用舒适

手枪式和双环式适合各种使用者的操作习惯，最为舒适的设计。稍事用力即可完成注射，保证最高的生产水平。



## ► 快速、精确调节注射剂量

通过调节测微螺杆可轻松设定注射剂量。287型双头注射器的两个旋环可分别设定注射剂量。锁定装置甚至可在超低剂量注射的条件下确保每次注射剂量不发生变化。可选注射剂量范围宽，适于各种动物的注射操作。




## ► 高品质材料制备

接触液体的部件	材料
进液管	硅胶
玻璃套管	硼硅玻璃
垫圈、套管	FPM
活塞	不锈钢
阀门系统	镍铬合金
垫圈、阀门	PTFE
弹簧和滚珠轴承、阀门	不锈钢
重坠、进液插管	镍铬合金

## ► 活塞紧密，无环形垫圈

不锈钢活塞和硼硅玻璃套管，精确度高、光滑易推、结合紧密。无环形垫圈，减少装垫或更换的麻烦。

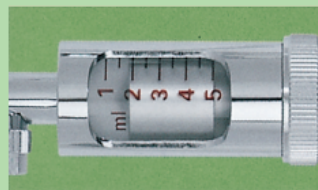

## ► 消毒和保养

注射器由6个主部件组成，容易拆卸和组装。所有部件的快速拆装使得清洗过程快速、高效。组装好后于沸水或121°C (250°F) 高压消毒锅中消毒。

