



SIRINGHE AUTOMATICHE SOCOREX® 167/187/287

Guida Rapida


Impostazione del volume

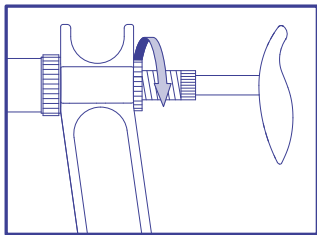

Svitare il dado di serraggio.

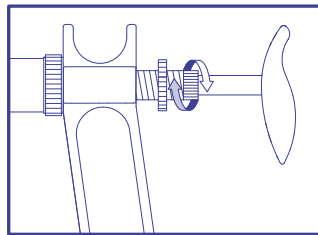


Regolare lo stantuffo sul volume desiderato.

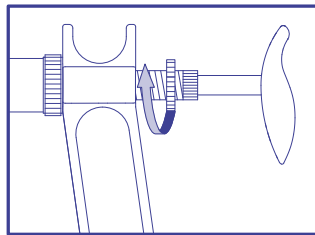


Stringere il dado di serraggio.

Posizionamento del corpo

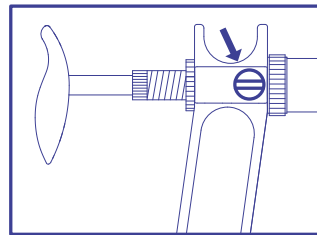


Regolare la posizione del corpo/impugnatura con la vite di serraggio sul lato del manico.


Installazione del tubicino

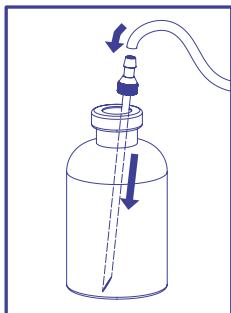

Inserire l'ago di alimentazione. Collegare il tubicino.

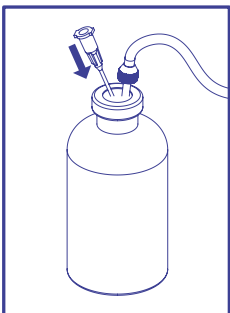


Inserire la cannula di sfiato.

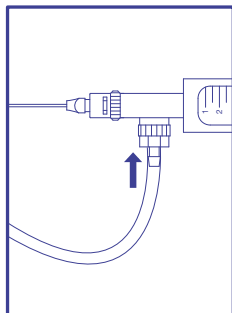


Collegare il tubicino alla siringa.

Porta fiala

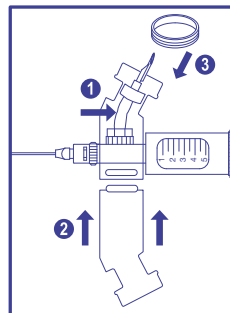


Inserire il tubo di collegamento e l'ago, assemblare le parti.

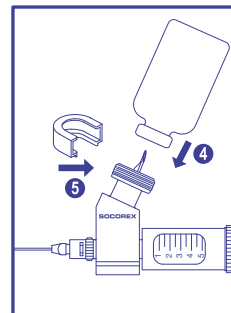


Perforare il tappo in gomma della bottiglietta, bloccare la bottiglietta.

Attivazione (priming)

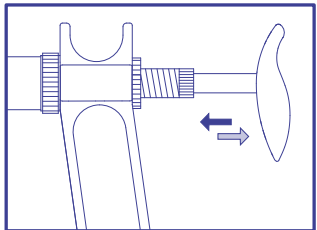


Attivare l'impugnatura, fino a quando il liquido non avrà raggiunto l'ago.

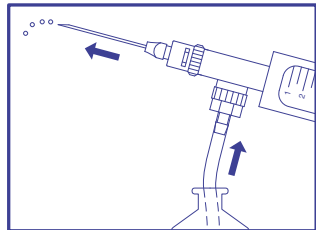


Attivare in posizione verticale, espellere il liquido ed eliminare eventuali bolle d'aria.

Valvole ostruite

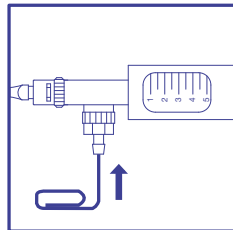


Spingere una graffetta per liberare la sfera della valvola.

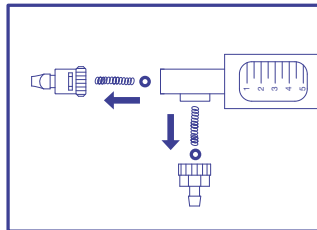


Se non è sufficiente, disassemblare le valvole e pulire.


Manutenzione quotidiana: Depurazione, smontaggio e pulizia

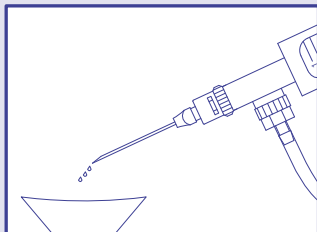


Risciacquare con acqua calda e spurgare completamente.

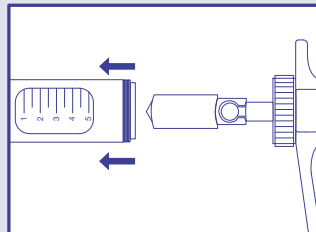

Svitare il corpo e rimuoverlo.

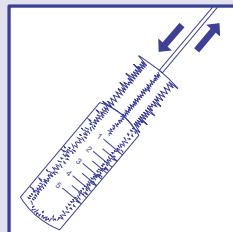


Pulire i residui all'interno del fusto in vetro con uno scovolino.

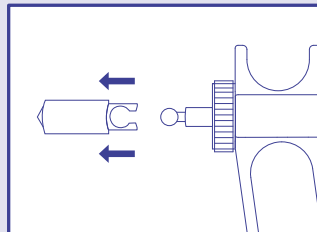


Staccare lo stantuffo, pulirlo e lasciarlo asciugare.


Montaggio

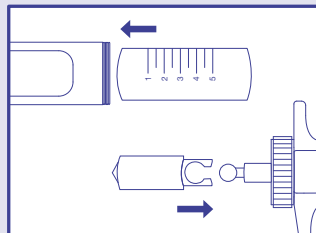

Montare il fusto in vetro all'interno del corpo con cautela. Collegare lo stantuffo alla barra dell'impugnatura.

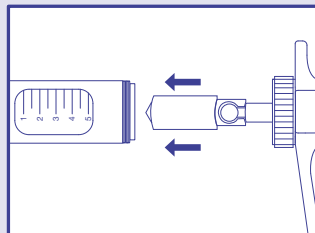

Inserire lo stantuffo all'interno del fusto in vetro delicatamente e quindi avvitare il corpo.

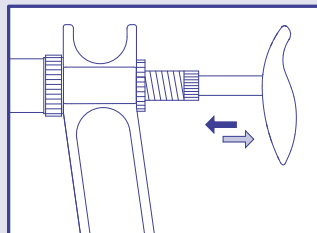

Attivare una o due volte per verificare il corretto funzionamento.



I.SYR.I - B0419



ERGONOMIC COMFORT