



SERINGUES AUTOMATIQUES SOCOREX® 167/187/287

Guide rapide


Réglage du volume

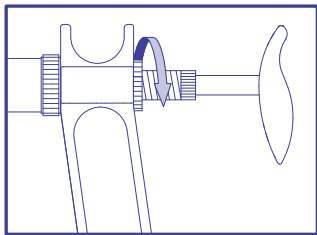

Desserrer le curseur.

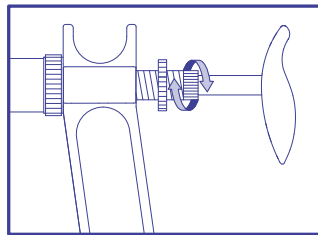


Déplacer le piston jusqu'au volume désiré.

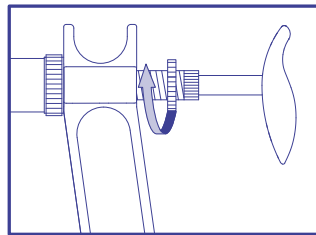


Resserrer le curseur.

Réglage poignée

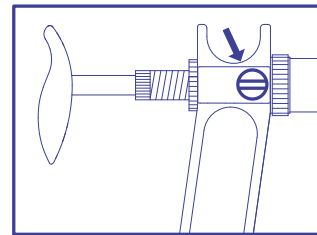


Ajuster le corps et la poignée en dévissant la vis positionnée sur le côté.


Mise en place du tuyau

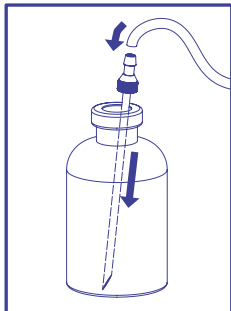

Placer la canule d'aspiration.
Raccorder le tuyau.

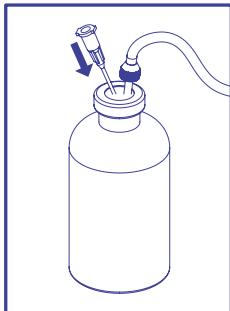


Placer la canule d'aération.

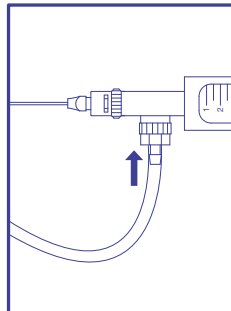


Raccorder tuyau et seringue.

Porte-flacon

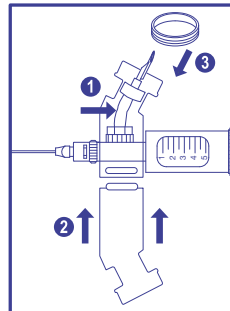


Fixer tuyau et aiguille,
assembler les autres pièces.

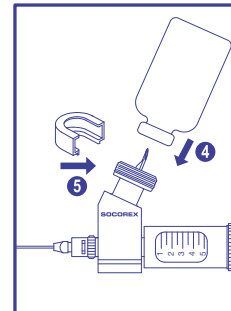


Percer le septum, bloquer la
bouteille.

Amorçage

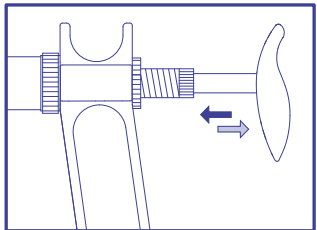


Activer le piston pour aspirer et éjecter
le liquide.

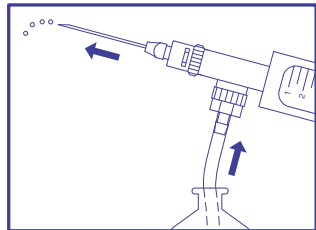


Seringue vers le haut, activer pour
éliminer les bulles d'air.

En cas de soupapes bloquées

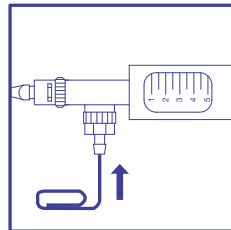


Introduire la tige dans la soupape,
pousser doucement pour décoller la bille.

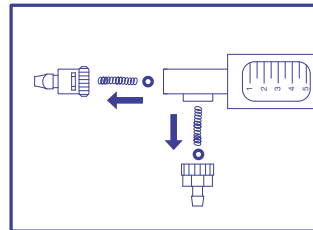


Si inefficace, démonter la soupape et
nettoyer.


Entretien quotidien : purger, démonter et nettoyer

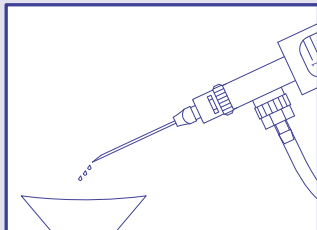


Rincer à l'eau chaude, purger entièrement.

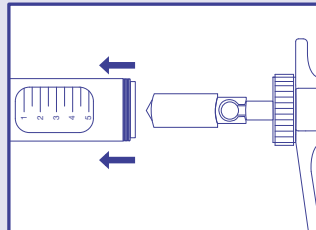

Dévisser le corps, le retirer.

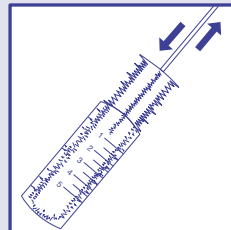


Nettoyer les dépôts dans le cylindre
en verre avec une brosse.

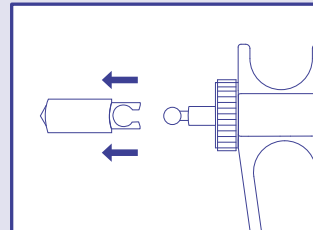


Détacher le piston, nettoyer et sécher.


Assemblage

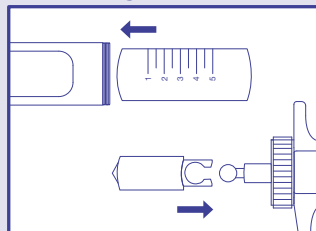

Introduire avec soin le cylindre en verre
dans le corps. Coupler piston et béquille.

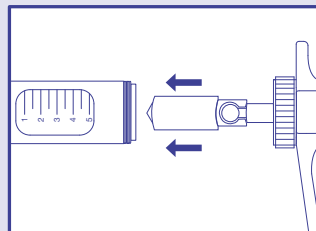

Enfiler doucement le piston dans le cylindre,
visser le corps.

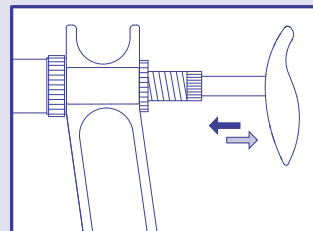

Activer la poignée 1 ou 2 fois, vérifier
le bon fonctionnement.



I.SYR.F - B0419

SOCOREX
SWISS

Socorex Isba SA - Suisse - www.socorex.com
Tél. +41 (0)21 651 6000 - socorex@socorex.com

