


SOCOREX® SELBSTFÜLLERSPRITZE ULTRA 1810

Kurzanleitung

Körperpositionierung

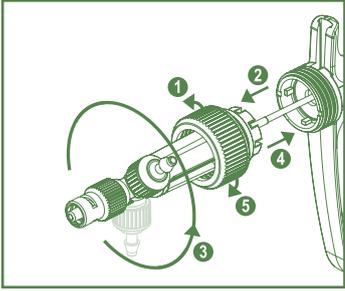


Körperposition ändern.


Anbringen des Schlauches



Zulaufnadel anbringen.
Schlauch anschliessen.

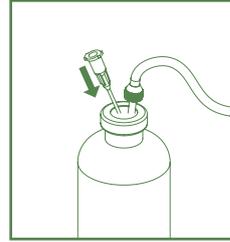


Belüftungskanüle
anbringen.

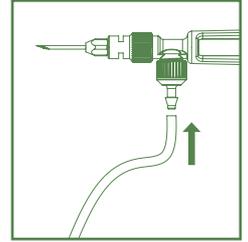


Schlauch an die Spritze
anschliessen.

Befüllen

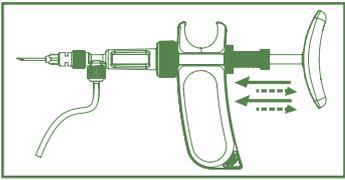


Aktivieren um Flüssigkeit anzusaugen
und abzugeben.

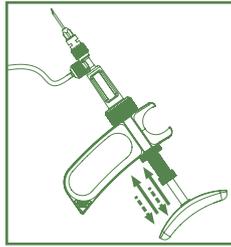


Luftblasen entfernen.


Volumeneinstellung

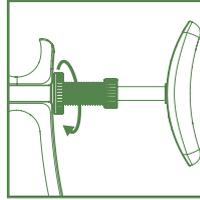

Entriegeln.

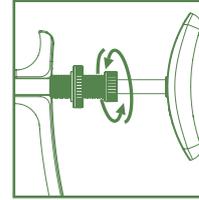


Stutzen drehen um
Kolben zu verschieben.

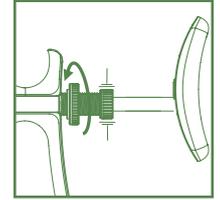


Stutzen halten und
verschliessen.

Im Fall eines verstopften Ventils


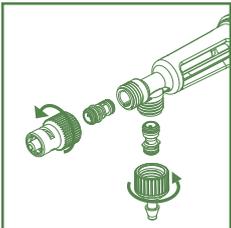


Ventil aufschrauben und
reinigen. Kein Werkzeug in
die Ventilkartusche einführen.

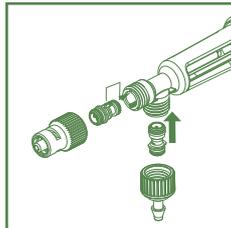


Einbau der Ventilkartuschen,
welche verwechslungssicher
codiert sind.

Ablesen des Volumens

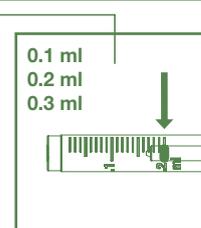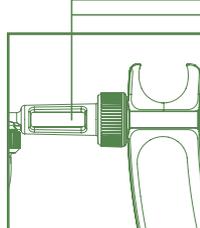


Dichtungsring mittig
der Graduierung.

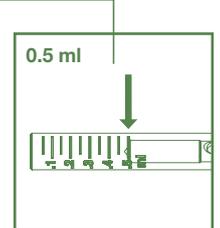


Unterkante des
Kolbens an der
Graduierung.

Durchspülen und Reinigen

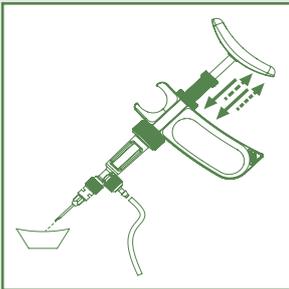

Impfstoff entnehmen und mit
Wasser/Spüllösung spülen.


Zerlegen und Reinigen

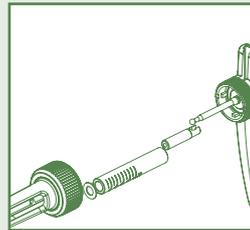


Mutter aufschrauben und Teile trennen.
Teile reinigen und trocknen.



Austausch der Kolbendichtung

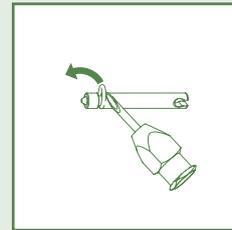


Kolbendichtung vorsichtig
entfernen.

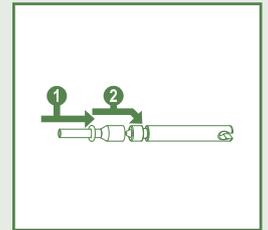


Verwendung der Führung um
neu geschmierten Dichtungs-
ring in die Nut einzuführen.


Zusammenbau

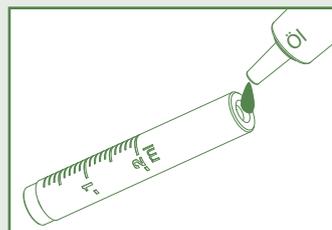

Zylindereinlass schmieren.

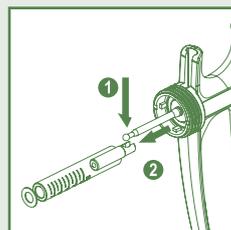

Kolben in den Zylinder
einführen. Stab verbinden.

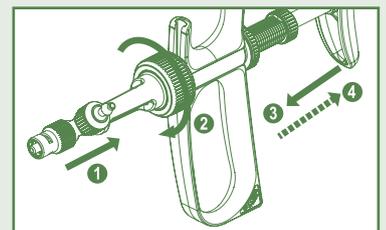

Gehäuse in gedrückter Position verbinden.



I.GUIDE.1810.D - A0419