


# SERINGUE AUTOMATIQUE SOCOREX® ULTRA 1810


## Guide Rapide

### Réglage du corps

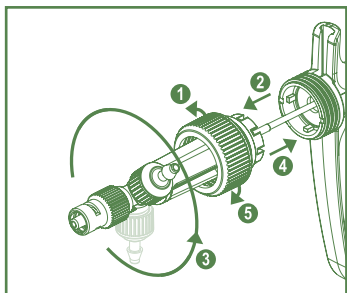


Régler la position du corps.

### Amorçage

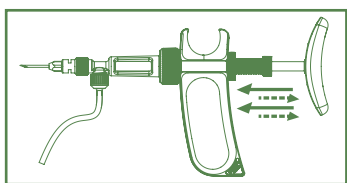


Activer le piston pour aspirer et éjecter le liquide.

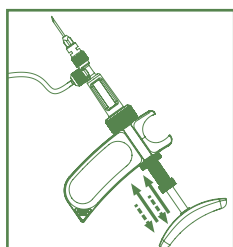


Supprimer les bulles d'air.


### Mise en place du tuyau

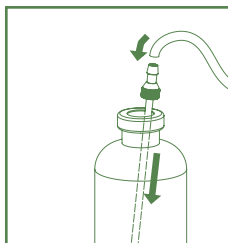

Placer la canule d'aspiration. Raccorder le tuyau.

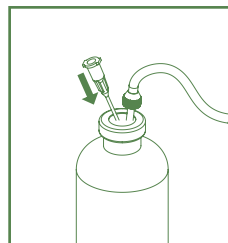


Placer la canule d'aération.

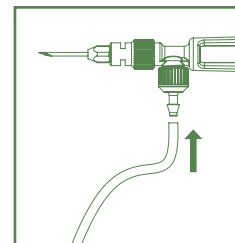


Raccorder le tuyau à la seringue.


### Réglage du volume

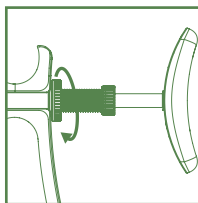

Déverrouiller.

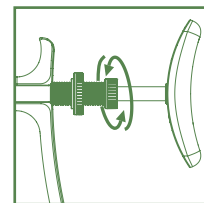


Tourner la douille pour ajuster le piston.

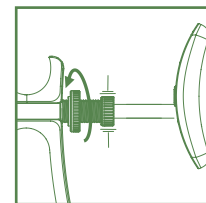


Tenir la douille et verrouiller.

### En cas de soupape bloquée


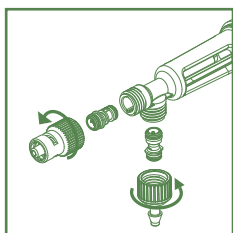


Dévisser et nettoyer les soupapes. Ne rien introduire à l'intérieur des cartouches.

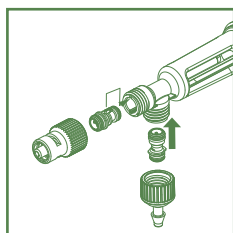


Remonter les pièces en respectant le détrompage.

### Lecture du volume

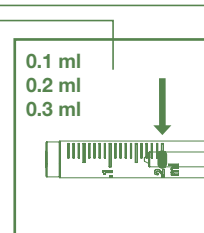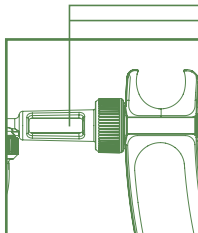


Joint centré sur la graduation.

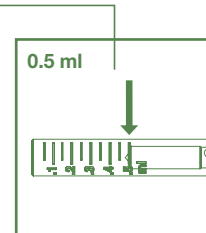


Tranche du piston sur la graduation.

### Purger et rincer

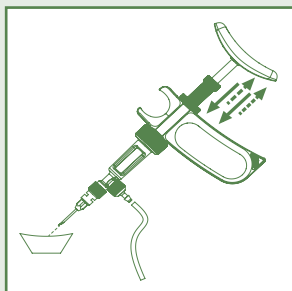

Récupérer le vaccin. Rincer à l'eau ou détergent.


### Démonter et nettoyer

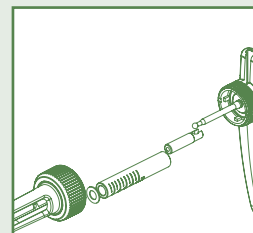


Dévisser l'écrou et séparer les pièces. Les nettoyer et les sécher.



### Changer le joint du piston

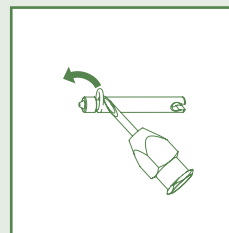


Enlever délicatement.

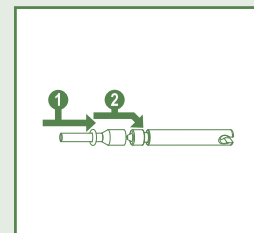


Utiliser le guide pour enfiler un nouveau joint lubrifié jusque dans sa rainure.


### Remontage

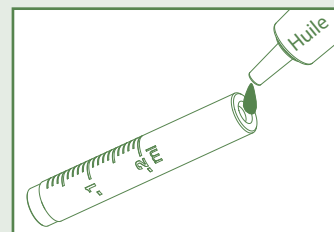

Lubrifier l'entrée du cylindre.

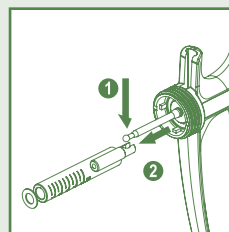

Placer le piston dans le cylindre. Fixer la tige.

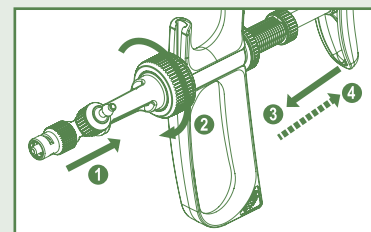

Visser le corps, béquille poussée.



I.GUIDE.1810.F - A0419

**SOCOREX**  
SWISS

Socorex Isba SA - Suisse - [www.socorex.com](http://www.socorex.com)  
Tél. +41 (0)21 651 6000 - [socorex@socorex.com](mailto:socorex@socorex.com)

