


# SIRINGHE AUTOMATICHE SOCOREX® ULTRA 1810


## Guida Rapida

### Posizionamento del corpo

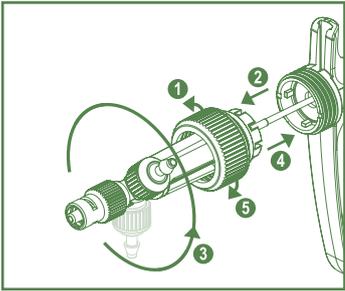


Regolare il posizionamento del corpo.

### Attivazione (priming)

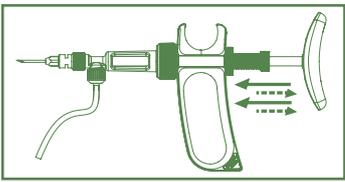


Attivare per aspirare ed espellere il liquido.

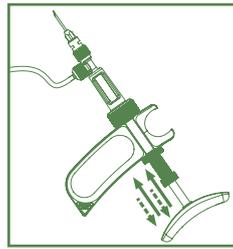


Rimuovere le bolle d'aria.

### Valvole ostruite

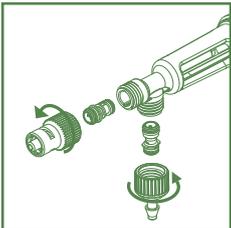


Svitare e lavare le valvole. Non inserire alcun utensile all'interno delle cartucce delle valvole.

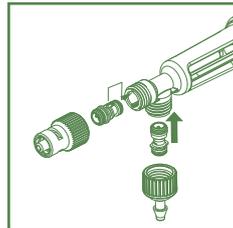


Assemblare nuovamente secondo la codifica meccanica.

### Depurazione e risciacquo

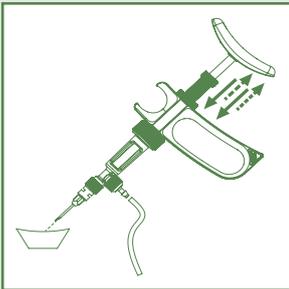


Recuperare il vaccino. Risciacquare con acqua/detergente.


### Smontaggio e pulizia

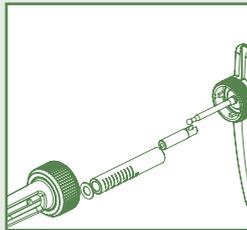


Svitare il dado e separare le parti. Pulire e asciugare le parti.

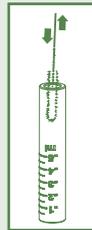

### Sostituzione dell'O-ring del pistone

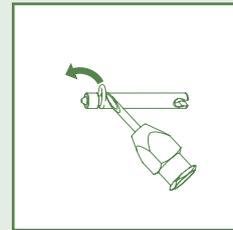


Rimuovere prestando attenzione.

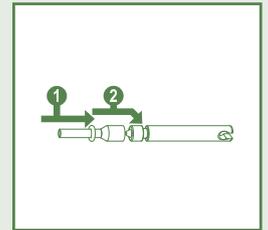


Utilizzare una guida per far avanzare il nuovo O-ring lubrificato nel pertugio.


### Montaggio

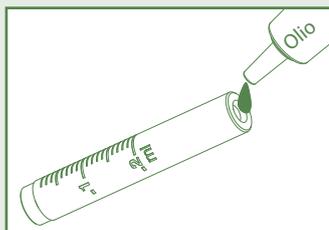

Lubrificare l'ingresso del fusto.

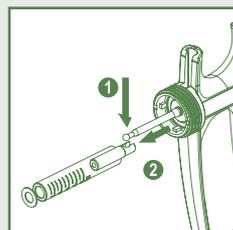

Montare il pistone nel fusto. Collegare l'ago.

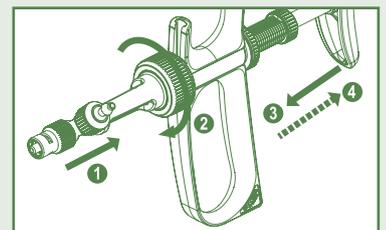

Collegare il corpo nella posizione premuta.



I.GUIDE.1810.I - A0419